



Videolaringoscopio i-view™

Un videolaringoscopio para cualquier situación donde se necesite intubar



Dispositivos para vías aéreas ▪ Accesorios para vías aéreas



Intersurgical presenta el videolaringoscopio i-view™

Un único tamaño • De un solo uso • Completamente desechable

i-view es el nuevo videolaringoscopio de un solo uso de Intersurgical. Proporciona la opción de un videolaringoscopio allí donde se necesite intubar.

Al incorporar una pala Macintosh, i-view puede usarse en laringoscopia directa y la técnica de inserción es más familiar e intuitiva que en los dispositivos con palas hiper-anguladas. Listo para usar en segundos después de sacarlo del embalaje, su diseño ergonómico asegura la facilidad de uso, y la pantalla LCD integrada proporciona una visión óptima en diversas condiciones de luz.



i-view permite disponer de un videolaringoscopio allí donde se necesite intubar.

Donde la disponibilidad de un videolaringoscopio puede ser limitada debido a los costes de adquirir dispositivos reutilizables para múltiples sitios, i-view proporciona una solución rentable, al combinar todas las ventajas de un videolaringoscopio completamente integrado en un dispositivo de un solo uso desechable. Esto hace que i-view sea ideal para su uso en:

- Entorno extra-hospitalario
- Urgencias
- Resucitación
- Anestesia
- Vía aérea difícil
- Cuidados Intensivos



Cuidados Intensivos



Entorno extra-hospitalario/Resucitación



Vía aérea difícil



Características y beneficios

Un videolaringoscopio para cualquier situación donde se necesite intubar

Un único tamaño de adulto

sin necesidad de almacenar varios tamaños

De un solo uso

reduce el riesgo de infecciones cruzadas y evita los costes del reprocesamiento

Completamente desechable

no hay que quitar las pilas antes de desecharlo

Pantalla LCD integrada

proporciona una visión óptima en diversas condiciones de luz

Diseño ergonómico

asegura un manejo cómodo e intuitivo



Botón On/Off

i-view está listo para usar en segundos después de sacarlo del embalaje

Cámara y luz LED

para una óptima visualización



Pala Macintosh

i-view puede utilizarse tanto para laringoscopia directa o como videolaringoscopio





i-view se suministra en cajas de 2 unidades. Cada dispositivo está embalado en una carcasa rígida especialmente diseñada y sellada con una cubierta de plástico para garantizar la protección del dispositivo tanto en el transporte como en el almacenamiento. El embalaje se abre fácilmente identificando la pestaña de la esquina con el símbolo del pulgar y tirando de la película de plástico superior hasta que el producto salga de forma fácil. El número de lote y la fecha de caducidad se muestran en el borde superior encima de la pantalla LCD.



Referencia	Descripción	Uds./caja
8008000	Videolaringoscopio i-view	2

[Consúltenos](#)[Más información](#)[Ver video](#)

IS6.15 ES • Issue 3 04.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
T: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical.es



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado
con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir
esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA