




Kit casco CaStar STARMed para CPAP

Guía rápida de configuración



Cuidados intensivos ▪ Interfaces para paciente ▪ **STARMed**

Kit casco CaStar StarMed para CPAP

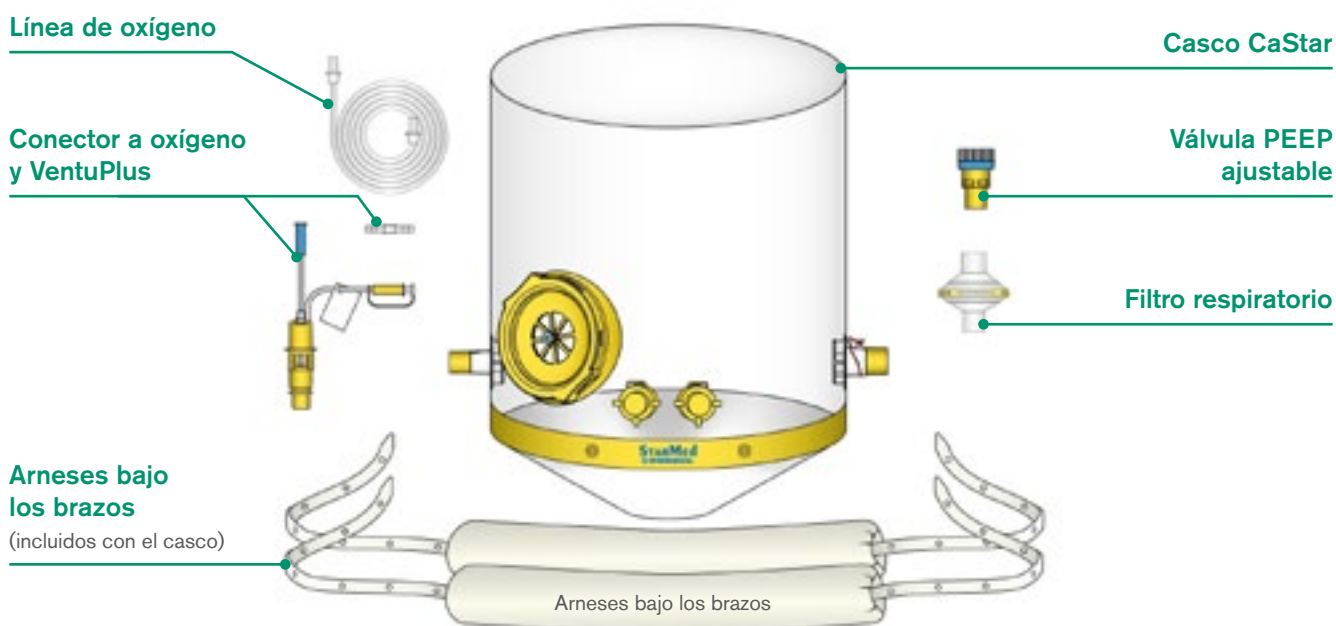

El casco CaStar es una interfaz para paciente cómoda, versátil y ligera para CPAP. Está diseñado para ofrecer una alternativa eficaz y cómoda a los métodos tradicionales de administración de CPAP, se tolera bien durante períodos prolongados y puede reducir los riesgos asociados tanto a la intubación endotraqueal como al uso de mascarilla facial.

Los cascos StarMed para CPAP incorporan un manómetro integrado para comprobar la presencia de presión dentro del casco. Ya que el principio de funcionamiento del manómetro se basa en una fuga mínima intencionada, se ha eliminado esta característica de algunos cascos para ayudar en el control

de infecciones. Proporcionamos un kit completo que permite una terapia CPAP flexible: el mismo casco se puede utilizar con un generador de flujo externo o con el cómodo accesorio generador de flujo tipo Venturi.

Los componentes del kit son:

- Casco CaStar para CPAP con válvula antiasfixia bidireccional sin manómetro
- VentuPlus, accesorio generador de flujo tipo Venturi y conector a O₂
- Filtro respiratorio
- Válvula PEEP ajustable 0-20 cm H₂O con conexión 22 macho

Kit casco CaStar para CPAP con generador de flujo tipo Venturi, filtro y válvula PEEP


Referencia	Tamaño	Circunferencia del cuello	Uds./caja
CP1171XXL/2	Extra Extra Grande	≥50cm	5
CP1171XL/2	Extra Grande	45-52cm	5
CP1171L/2	Grande	40-47cm	5
CP1171M/2	Mediano	34-41cm	5
CP1171S/2	Pequeño	27-34cm	5
CP1171XS/2	Extra Pequeño	17-27cm	5

El kit casco CaStar incluye los siguientes productos de Intersurgical. También se pueden pedir por separado. Consulte nuestra página web para ver la gama completa de accesorios.


Referencia	Descripción	Uds./caja
CP041*/2	Casco CaStar para CPAP con válvula antiasfixia bidireccional y puerto de acceso al paciente, sin manómetro (*sustituir por la letra del tamaño XXL, XL, L, M, S, XS)	5
CP924	VentuPlus, accesorio generador de flujo tipo Venturi	10
1174000	Línea de oxígeno	125
1690000	Filtro respiratorio Flo-Guard	50
SPV 20	Válvula PEEP ajustable 0-20 cm H ₂ O con conexión 22M	10




Configuración uno para CPAP: Uso con caudalímetro de O₂ doble

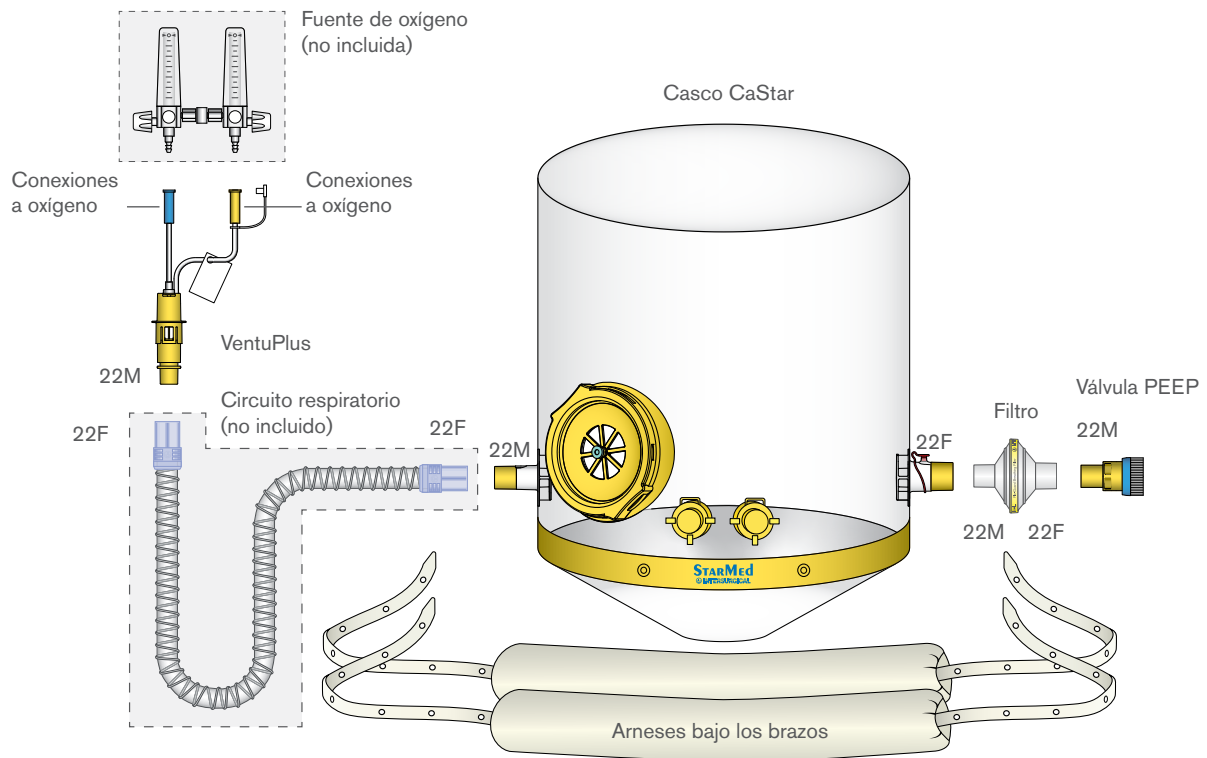


Configuración dos para CPAP: Uso con dos caudalímetros de O₂ simples

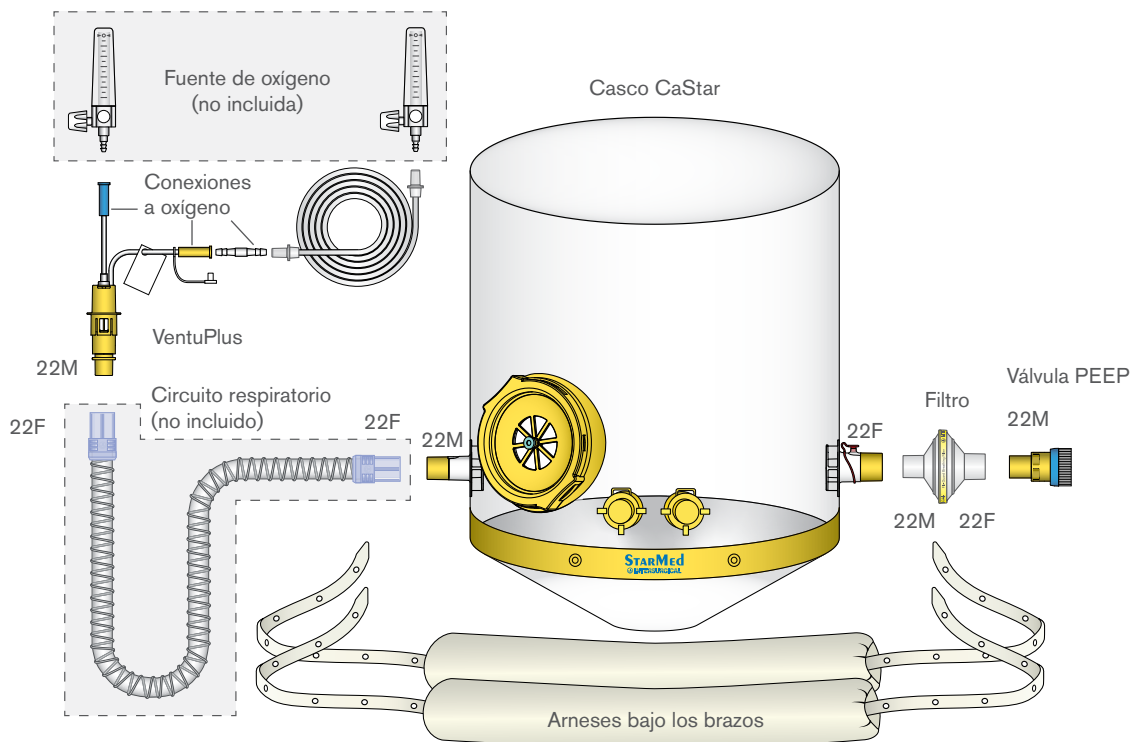

Configuración tres para CPAP: Uso con caudalímetro de O₂ simple (FiO₂ = 40%)

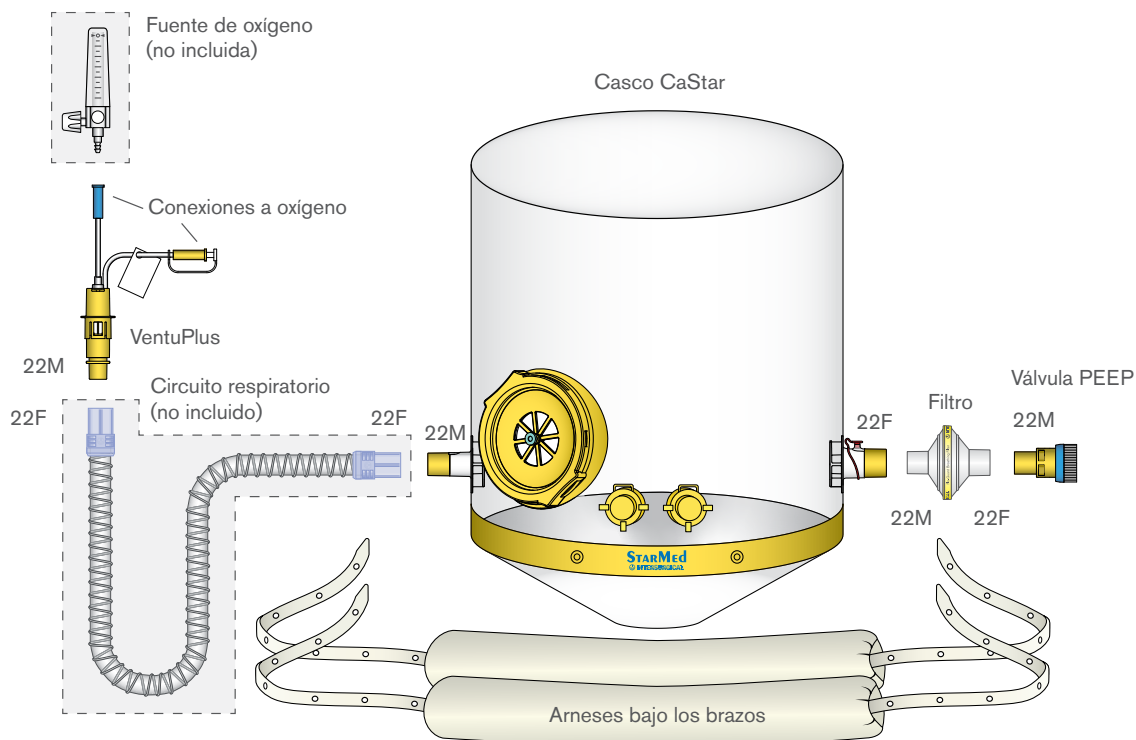

Configuración cuatro para CPAP: Uso con generador de flujo CPAP

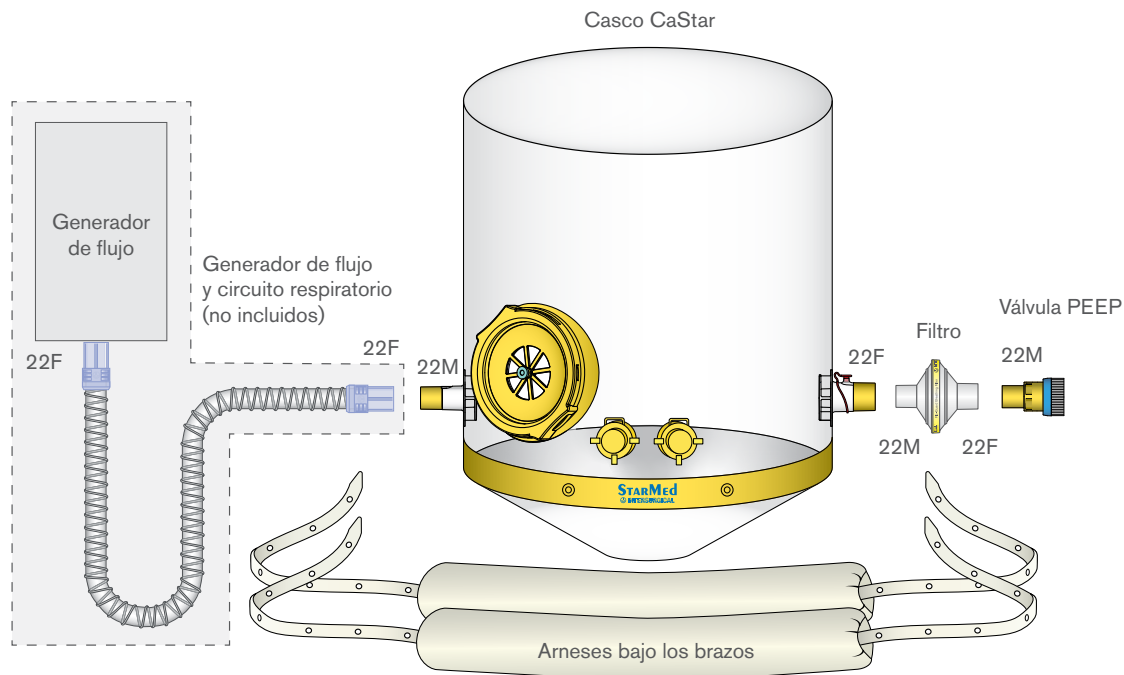

STARMed
 Base de datos de evidencias de cascos respiratorios y mascarillas StarMed
starmedevidence.intersurgical.com



INTERSURGICAL
 PRODUCTOS MDICOS DESECHABLES

Intersurgical Espaa S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Mstoles, Madrid, Espaa
 Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



Management System
 ISO 9001:2015
 EN ISO 13485:2016
 www.tuv.com
 ID 900005840



Fabricante:
 Intersurgical S.p.A.
 Mirandola (MO) Italia

Por favor, pienselo antes de imprimir.
 Ahorre energa y papel. Si tiene que imprimir esta ficha tcnica, hgalo por las dos caras.

IS1.56_ES • Issue 1 03.21