


Utilización de la cánula supraglótica i-gel®

Preparaciones previas a la inserción



1 Abra el paquete de **i-gel**, y sobre una superficie plana extraiga el envase rígido que protege al dispositivo.

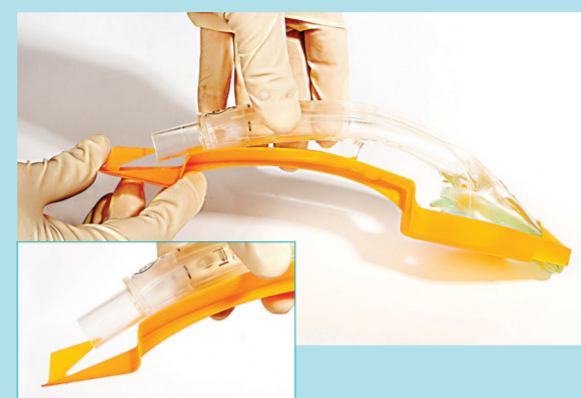

2 Saque la cánula y colóquela en la palma de la misma mano que sujeta el envase rígido, manteniendo el dispositivo entre el dedo pulgar y el índice.




3 Ponga una pequeña cantidad de lubricante con base acuosa (por ejemplo gel K-Y Jelly) sobre la superficie lisa del envase rígido.



4 Sujete **i-gel** por la pieza de mordida integrada con la mano libre y lubrique la parte posterior, los laterales y la parte delantera de la almohadilla con una fina capa de lubricante.

Técnica de inserción

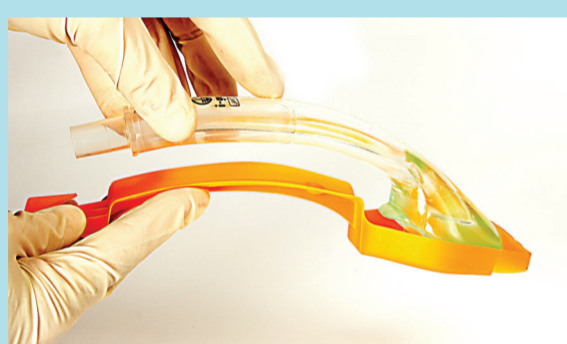


5 Coloque **i-gel** de nuevo en el envase rígido lista para su utilización.



6 Agarre firmemente la cánula **i-gel** lubricada por la pieza de mordida integrada. Coloque el dispositivo de manera que la salida de la almohadilla mire hacia la barbilla del paciente. El paciente debe estar en posición de "olfateo" con la cabeza extendida y el cuello flexionado. La barbilla debe presionarse suavemente antes de proceder a la inserción. Introduzca la punta suave en la boca del paciente en dirección hacia el paladar duro.



7 Deslice el dispositivo hacia abajo y hacia atrás a lo largo del paladar duro empujando de forma suave pero continua hasta percibir una **resistencia firme**.

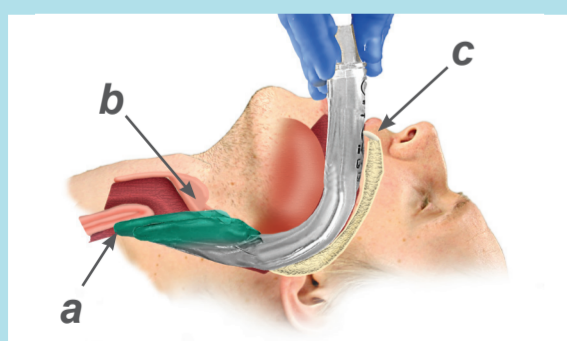


8 La punta de la cánula debería localizarse en la apertura esofágica superior (a) y la almohadilla debería localizarse frente a la estructura laríngea (b). Los incisivos deberían descansar sobre la pieza de mordida integrada (c).



9 Se debe fijar **i-gel** con adhesivo de "maxilar a maxilar".



10 Si se observa de forma temprana resistencia durante la inserción, se recomienda aplicar "presión en la mandíbula" (arriba) o una "inserción con rotación profunda" (derecha).

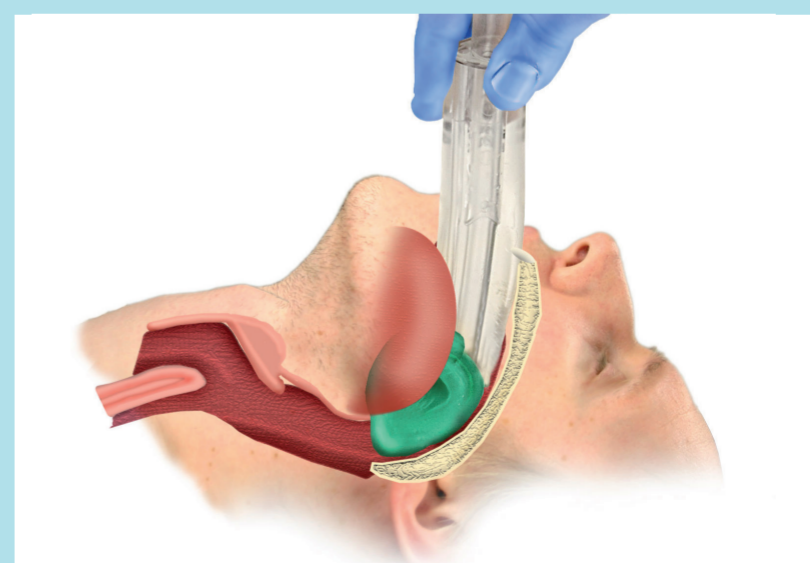

Natural airway management

| Tamaño i-gel | Paciente | Guía de pesos recomendados (kg) |
|--------------|----------------|---------------------------------|
| 3 | Adulto pequeño | 30-60 |
| 4 | Adulto mediano | 50-90 |
| 5 | Adulto grande | 90+ |

Notas importantes a la técnica de inserción recomendada

A veces se puede percibir una sensación de resistencia antes de alcanzar el punto final. Esto se debe al paso de la almohadilla de i-gel a través de los pilares fauciales. Es importante que se continúe con la inserción hasta que se note una **resistencia firme**.

Una vez que se ha llegado a este punto y los dientes se localizan sobre la pieza de mordida, no empuje repetidamente i-gel hacia abajo ni aplique fuerza excesiva durante la inserción.

No deben hacerse más de tres intentos por paciente.


No es necesario introducir los dedos ni pulgares en la boca del paciente durante el proceso de inserción del dispositivo.

visite

www.i-gel.com

T: +34 916657315

mail@intersurgical-es.com

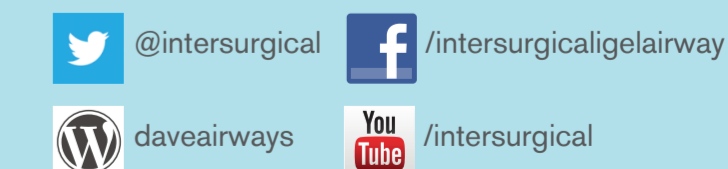

Estas instrucciones NO constituyen una guía completa para la preparación, inserción y uso de i-gel. El usuario deberá familiarizarse previamente con el manual de usuario completo antes de intentar usar i-gel. Pueden disponer de copias del manual poniéndose en contacto con Intersurgical o a través de nuestra página web: www.i-gel.com

Separar siempre i-gel del envase rígido antes de la inserción. El envase no es un introductor y nunca debe ser introducido en la boca del paciente.

K-Y Jelly® es una marca registrada de Johnson and Johnson Inc.

El manejo de la vía aérea ha evolucionado

i-gel_using_poster_ES 08.13